

Gebrauchsanweisung

***Benetzende Augentropfen mit Hyaluronsäure –
natürliche Befeuchtung: wohltuend und langanhaltend.***

Hylo-Vision® sine

(Natriumhyaluronat 0,10 %)

Benetzende Augentropfen

Beschreibung: Hylo-Vision® sine ist ein steriler, konservierungsmittelfreier, viskoelastischer, klarer Schutzfilm für die Hornhaut. Es besteht ausschließlich aus natürlichen, biologischen Substanzen. Hylo-Vision® sine schützt und befeuchtet die Augenoberfläche und macht sie gleitfähig. Dadurch bewirkt es lang anhaltende Erleichterung bei Beschwerden im Zusammenhang mit

- mechanischer Beanspruchung, z. B. beim Tragen harter oder weicher Kontaktlinsen oder bei diagnostischen Eingriffen am Auge,
- bei Umweltstress, z. B. durch Klimaanlage, Wind, Kälte, Trockenheit oder Luftverschmutzung, beispielsweise durch Zigarettenrauch oder
- bei Sehstress durch intensives Sehen, z. B. an Computerbildschirmen, Mikroskopen oder bei langen Autofahrten.

Anwendung: Trennen Sie ein Ein-Dosis-Behältnis vom Riegel ab. Vergewissern Sie sich, dass jedes Ein-Dosis-Behältnis unbeschädigt ist. Zum Öffnen drehen Sie das flache Ende des Ein-Dosis-Behältnisses ab (nicht ziehen). Geben Sie ein oder zwei Tropfen in jedes Auge. Wenn Sie anhaltende Probleme haben, besprechen Sie diese bitte mit Ihrem Augenarzt!

Zusammensetzung: Natriumhyaluronat (0,10 %), Natriumchlorid, Natriummonohydrogenphosphat, Natriumdihydrogenphosphat, gereinigtes Wasser.

Packungsgröße: Verkaufseinheit: Ein-Dosis-Behältnisse, 20 x 0,4 ml

Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise:

- Nicht verwenden bei beschädigtem Ein-Dosis-Behältnis.
- Das Auge mit dem Ein-Dosis-Behältnis nicht berühren.
- Wegen des Kontaminationsrisikos Kontakt der Öffnung des Ein-Dosis-Behältnisses vermeiden.
- Nicht anwenden bei einer bestehenden Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe.
- Nur zur einmaligen Anwendung bestimmt; da Hylo-Vision® sine keine Konservierungsmittel enthält, sollten Reste der Lösung nicht mehr verwendet werden.
- Nicht gleichzeitig zusammen mit Augenarzneimitteln in das Auge eintropfen.
- Nicht an infizierten Augen anwenden.
- Nach der Anwendung kann vorübergehend die Sehschärfe verringert sein; in diesem Fall kein Fahrzeug lenken, keine Maschinen bedienen und warten, bis die normale Sehschärfe wieder eingetreten ist.
- Verwenden Sie die Augentropfen nicht nach Ablauf des Verfallsdatums. Dieses finden Sie auf jedem Ein-Dosis-Behältnis eingepreßt.

Lagerung: Bei 2 °C bis 25 °C lagern. Vor Frost schützen. Chargennummer und Verfallsdatum auf dem Ein-Dosis-Behältnis eingepreßt.

Hersteller: Hyaltech Ltd. Research Avenue South,
Heriot-Watt Research Park, Edinburgh EH14 4 AP Schottland, UK

CE 0344



Vertrieb:

OmniVision GmbH, Lindberghstrasse 7, 82178 Puchheim



23253500/23254300

