




Bedienungsanleitung für das Infusionsbesteck zu **Thiogamma® Turbo-Set**

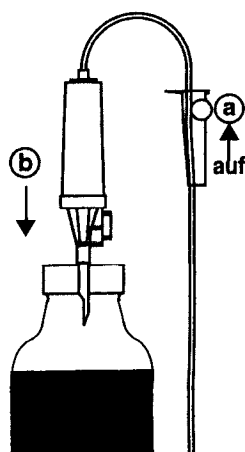

1. Nehmen Sie das Infusionsbesteck aus der Einzelpackung.
2. Stechen Sie das Infusionsbesteck mit geöffneter Rollenklemme (a) (Anlieferungszustand) in das Behältnis mit Thiogamma® Turbo-Set (b) direkt ein.

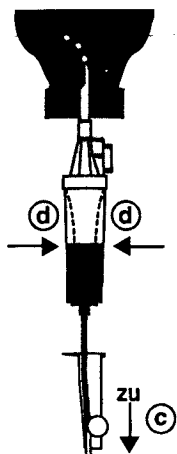

3. Schließen Sie die Rollenklemme (c) und hängen Sie die Flasche mit der Aufhängevorrichtung (am Etikett) an den Infusionsständer.
4. Stellen Sie durch Zusammendrücken des Unterteils der Tropfkammer (d) den Flüssigkeitsspiegel bis zur Hälfte der Tropfkammer ein.

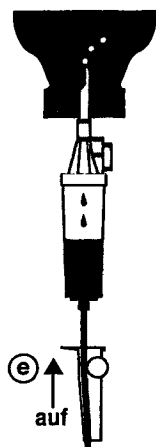

5. Öffnen Sie die Rollenklemme (e).
6. Entlüften Sie das System und schließen die Rollenklemme.
7. Verbinden Sie das Infusionsbesteck mit beigegeführtem Butterfly.