

Verbesserte Befeuchtung, Erfrischung & Schutz der Augenoberfläche.

Gebrauchsanweisung

Pan-Vision®

Sterile Lösung mit Hypromellose und Dexpanthenol zur verbesserten Befeuchtung, Erfrischung und Schutz der Augenoberfläche

Beschreibung

Pan-Vision® ist eine sterile wässrige Lösung mit 0,3 % Hypromellose und Dexpanthenol zur Benetzung der Augenoberfläche. Zur Gesunderhaltung und optimalen Funktion des Auges müssen Bindehaut und Hornhaut ständig feucht gehalten werden. Nur so können lästige Beschwerden verhindert werden. Pan-Vision® hat physikalisch-epithelprotektive, befeuchtende und pflegende Eigenschaften. Es beseitigt Trockenheitsgefühl und leichte Reizungen der Augen aufgrund von Umwelteinflüssen, wie z. B. durch Klimaanlage, Staub und Belastung durch Sonneneinstrahlung oder bei Müdigkeit und langer Bildschirmarbeit.

Pan-Vision® hat folgende chemisch-physikalische Eigenschaften: es enthält eine klare Flüssigkeit, die zu allen Teilen wasserlöslich ist. Es entstehen keine Ausfällungen an metallischen Salzen oder organischen Residuen, die möglicherweise in die körpereigene Tränenflüssigkeit gelangen können. Der pH-Wert ist perfekt kompatibel mit dem Augengewebe und der Tränenflüssigkeit. Daher ist Pan-Vision® besonders gut verträglich und beseitigt rasch lästiges Trockenheitsgefühl. Darüber hinaus enthält Pan-Vision® Dexpanthenol, das zur Gruppe der B-Vitamine gehört. Dieser Bestandteil hat auf Grund seiner hohen Wasserbindungskapazität die Fähigkeit, das Auge zu erfrischen und angenehm zu pflegen. Die befeuchtenden Eigenschaften der Hypromellose werden hierdurch wirkungsvoll unterstützt.

Zusammensetzung

Hypromellose 0,3%, Dexpanthenol, Cetrimid 0,010%, Dinatriumedetat, Natriummonohydrogenphosphat, Kaliumdihydrogenphosphat, gereinigtes Wasser.

Gebrauchshinweise

Drücken Sie das Fläschchen leicht zusammen und tropfen Sie 1–2 Tropfen in den unteren Bindehautsack. Falls erforderlich, können Sie mehrmals am Tag nachtropfen.

Vorsichtsmaßnahmen

- Verwenden Sie Pan-Vision® nicht während des Tragens von weichen Kontaktlinsen. Falls die Anwendung zusammen mit weichen Kontaktlinsen aus medizinischen Gründen notwendig ist, warten Sie bitte mindestens 15 Minuten bis zum Wiedereinsetzen der Kontaktlinsen.
- Die Tropferspitze nicht berühren.
- Verwenden Sie Pan-Vision® nicht bei Augenentzündungen.
- Verwenden Sie Pan-Vision® nicht zusammen mit anderen Präparaten zur äußerlichen Anwendung am Auge.
- Bei bekannten Unverträglichkeiten gegenüber einem der Inhaltsstoffe wenden Sie Pan-Vision® bitte nicht an.
- Benutzen Sie das Produkt nicht nach Ablauf des Verfalldatums.
- 30 Tage nach dem ersten Öffnen sollten Sie die Tropfen nicht mehr verwenden.

Aufbewahrung

Pan-Vision® Augentropfen sollten nicht bei Temperaturen über 25 °C aufbewahrt werden. Vor Licht- und Sonneneinstrahlung schützen.

Warnhinweis

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Packungsgröße

Tropfflasche mit 10 ml Lösung.

Medizinprodukt

Stand der Gebrauchsinformation

Juni 2005

Hersteller

Bruschettini s.r.l., Genua, Italien

Vertrieb

OmniVision GmbH, Lindberghstrasse 7, D-82178 Puchheim



STIMULA

