

Medizinprodukt

Genauigkeit:

99%*

Kade[®] Schwangerschaftstest

Test zur Früherkennung einer Schwangerschaft
durch immunochromatographische Bestimmung
des HCG-Wertes im Urin

Empfindlichkeit: 20 IU/L Inhalt: 1 Test

** gemäß klinischer Studie waren >99 % der getesteten Muster korrekt*



profemina

Gesundheit
für die Frau

Anwendungshinweise:

- Test zur Eigenanwendung.
- Verpackung öffnen, Test entnehmen und Schutzkappe entfernen.
- Das mit dem Pfeil gekennzeichnete Absorptionsfeld unter den Urinstrahl halten. Anschließend die Schutzkappe wieder aufstecken.
- Nach 3-5 Minuten kann das Ergebnis abgelesen werden.

C - Kontrolllinie
T - Testlinie



Test positiv (schwanger)




Test negativ (nicht schwanger)



Test ungültig (Test muss wiederholt werden)



Test ungültig (Test muss wiederholt werden)

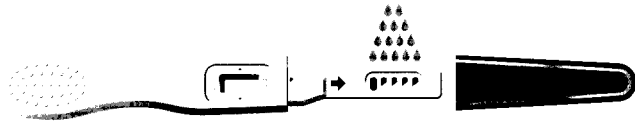

Nicht direkter
Sonneneinstrahlung aussetzen.



Zwischen 4 °C und 30 °C lagern.



Vor Nässe und Feuchtigkeit schützen.



Nicht zur Wiederverwendung.



CE 0483

IVD