

COMPEED® Herpesbläschen-Patch

- Fördert die Wundheilung schnell und unsichtbar mit 7 Vorteilen
 - 1. Fördert die Wundheilung
 - 2. Deckt Bläschen sofort ab
 - 3. Lindert Kribbeln, Juckreiz und Brennen
 - 4. Reduziert Rötungen und Schwellungen
 - 5. Mindert das Schmerzgefühl
 - 6. Verringert die Bläschenbildung und beugt Krusten- oder Schorfbildung vor
 - 7. Reduziert das Risiko weiterer Ansteckungen aus der Wunde heraus

Wie funktioniert das Patch?

Warum ist das COMPEED® Herpesbläschen-Patch so effektiv?

Das COMPEED Herpesbläschen-Patch wirkt sich in jeder Phase des Ausbruchszyklus positiv auf die Heilung aus:

Phase 1 - Juckreiz-Stadium

Hilft die Symptome zu lindern

Durch Abdecken der Herpesbläschen mit dem COMPEED® Herpesbläschen-Patch - bei Fieberblasen wird die externe Stimulation der gereizten Haut verringert. Dadurch hilft es die Symptome wie Juckreiz und Brennen zu lindern.

Phase 2 - Bläschen-Stadium

Deckt die Bläschen ab und reduziert die Hautspannung

Keine peinlichen Situationen mehr, da das Patch diskret die sich bildenden Bläschen abdeckt und hilft den Lippenherpes-Ausbruch zu behandeln. Es reduziert die Hautspannung und lindert unangenehme Hautempfindungen.

Phase 3 - Nässe/Wund-Stadium

Schützt vor Verschmutzungen und weiteren Infektionen von außen

Unterstützt dank der HYDROCURE® Technologie den Aufbau eines optimalen Wundheilungsmilieus. Schützt die aufgeplatzten Herpesbläschen vor Verschmutzung und weiteren Infektionen von außen und hilft die weitere Verbreitung des Virus an der geöffneten Blase zu verhindern.

Phase 4 - Krusten-Stadium

Beugt Schorfbildung vor

Die HYDROCURE® Technologie mit dem Prinzip der feuchten Wundheilung sorgt für optimale Heilungsbedingungen und beugt gleichzeitig der Schorfbildung vor.

Phase 5 - Heilungsstadium

Sorgt für optimale Heilungsbedingungen

Keine Verschorfung und Verkrustungen bedeutet keine Narbenbildung im Gesicht. COMPEED® Herpesbläschen-Patch - bei Fieberblasen unterstützt einen raschen Weg zur Besserung.

Klinische Informationen

Ergebnisse aus dem klinischen Test zur Wirksamkeit*

Die Testpersonen:

- **92 %** verspürten weniger Juckreiz
- **90 %** verspürten weniger Brennen

- 90 % fanden, dass das Patch Herpesbläschen weniger sichtbar macht
- 81 % hatten keine Verkrustungen und Narbenbildung
- 95 % waren mit dem Patch zufrieden
- 71 % waren SEHR zufrieden

* Clinical Investigation Report, Prof. Tonny Karlsmark, MD, Bispebjerg Hospital, Copenhagen, Dec. 2004

Anwendung des Patches

Inhalt

COMPEED® Herpesbläschen-Patch enthält 15 Pflaster für die Behandlung eines Lippenherpes-Ausbruchs von Anfang bis Ende. Die kleine praktische Packung, die gut in jede Handtasche passt, enthält zudem einen kleinen Spiegel zum einfachen Aufbringen des Pflasters.



Anwendung

Die besten Ergebnisse können erzielt werden, wenn das Patch bei den ersten Anzeichen von Juckreiz und Brennen angewandt wird. Verwenden Sie es weiterhin tagsüber und in der Nacht, um alle Symptome der 5 Verlaufsstadien zu behandeln.

Waschen Sie vor der Anwendung Ihre Hände. Das Patch sollte auf gereinigter, getrockneter Haut aufgebracht werden. **Nicht in Kombination mit Cremes oder Salben verwenden**, da das Patch sich dadurch lösen könnte. Befolgen Sie die Anweisung auf dem Beipackzettel.

1. Entfernen Sie die Schutzhülle vom Patch und halten Sie die Enden der Trägerfolie mit beiden Händen.

2. Ziehen Sie vorsichtig an den Enden der Trägerfolie in die darauf angegebene Pfeilrichtung bis die klebrige, haftende Seite des Patches halb freigelegt ist.

3. Verwenden Sie den Spiegel, um das Patch korrekt zu platzieren. Drücken Sie den halb freigelegten Teil des Patches sanft mit einem Finger auf, um das Patch auf der betroffenen Stelle zu fixieren.

4. Ziehen Sie das Ende der Trägerfolie langsam und gleichmäßig nach und gleichzeitig weg von der Haut bis sich das Patch von der Trägerfolie löst.

5. Make-up oder Lippenstift können über dem Patch aufgetragen werden.

6. Das Pflaster sollte so lange auf der Wunde bleiben bis es anfängt sich von selbst zu lösen. Zum Entfernen ziehen Sie vorsichtig eine Ecke des Patches entlang der Haut bis es sich dehnt und nach und nach ablöst. Nicht nach oben und von der Haut wegziehen, da es so schwieriger zu lösen ist.

Klicken Sie auf einen der folgenden Links, um eine Animation zur Anwendung des Pflasters anzuzeigen:

Nach der Anwendung - Lippenstift, Make-up usw.

Wenn das Patch gut sitzt, können Sie Make-up oder Lippenstift auf dem Patch auftragen.

Vergessen Sie nicht, sich die Hände zu waschen.

Wechseln des Patches.

In jedem Fall gilt, dass das Patch so lange auf der Wunde verbleiben sollte bis es anfängt sich von selbst zu lösen. Im Durchschnitt haftet es ca. 8-10 h. Dies kann jedoch individuell verschieden sein. Erst wenn das Patch sich von der Haut ablöst, sollte es durch ein neues ersetzt werden. Zum Entfernen des Patches ziehen Sie es vorsichtig parallel zur Haut ab.