

Vislube® Gebrauchsinformation Augenheilkunde**VISLUBE®**

Hyaluronsäure, Natriumsalz 0,18 %.

Zum Benetzen von Kontaktlinsen während des Tragens.

Steril, frei von Konservierungsstoffen.

Zusammensetzung:

1 ml hypotonische Lösung enthält 1,8 mg Hyaluronsäure, Natriumsalz sowie Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Dinatriumhydrogenphosphat, Natriumzitat, Magnesiumchlorid, Kalziumchlorid, Wasser für Injektionszwecke.

Anwendungsgebiete:

Bei Trockenheit, nachlassendem Tragekomfort oder Schleiersehen während des Tragens von Kontaktlinsen.

Gegenanzeigen:

Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Nicht gleichzeitig mit Arzneimitteln, welche auf das Auge aufgetragen werden, anwenden, da VISLUBE® deren Wirkung verändern kann.

Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:

Soweit von Ihrem Kontaktlinsenspezialisten nicht anders empfohlen, 4mal täglich 1–2 Tropfen VISLUBE® während des Tragens auf die Kontaktlinse oder in den Bindehautsack träufeln. Durch Lidschlag wird die Lösung verteilt und bildet eine transparente und haltbare Flüssigkeitsschicht auf den Oberflächen von Auge und Linse.

Hinweise:

Tropföffnung der Ampulle nicht berühren und nicht an das Auge bringen. Beschädigte Ampullen von VISLUBE® nicht anwenden. Da VISLUBE® keine Konservierungsstoffe enthält, sollten Reste der Lösung nicht mehr verwendet werden.

Zwischen 2°C und 25°C lagern! Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr anwenden. Falls Ihre Beschwerden unter der Anwendung von VISLUBE® anhalten oder nach dem Absetzen von VISLUBE® wieder auftreten, sollten Sie sich in ärztliche Behandlung begeben.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Eigenschaften und Wirkungsweise:

VISLUBE® enthält Hyaluronsäure, ein natürliches Polymer, das auch in Strukturen des menschlichen Auges vorkommt. Die besonderen physikalischen Charakteristika von Hyaluronsäure verleihen VISLUBE® seine wichtigen "viskoelastischen" Eigenschaften. Während VISLUBE® eine stabile Schicht auf den Oberflächen von Auge und Linse bildet, ist sein Widerstand gegenüber Bewegungen, wie dem Lidschlag, gering. VISLUBE® ist frei von Konservierungsstoffen und ausgezeichnet verträglich.

Darreichungsform und Packungsgröße:

20 x 0,3 ml Einmaldosen.

60 x 0,3 ml Einmaldosen.

Stand der Information: März 2007