

Gebrauchsanweisung, bitte sorgfältig lesen

**Benetzende Augentropfen mit Hyaluronsäure –
ohne Konservierungsmittel, steril und phosphatfrei**

**Für eine natürliche Befeuchtung: wohltuend, gut ver-
träglich und lang anhaltend.**



Hylo-Vision®
SafeDrop® *gel*

(Natriumhyaluronat 0,30 %)

**Zur intensiven Befeuchtung der Augenoberfläche bei
Trockenheitsgefühl der Augen.**

Was ist Hylo-Vision® SafeDrop® Gel?

Hylo-Vision® SafeDrop® Gel ist ein steriles konservierungs-
mittelfreies hochviskoses Benetzungsmittel im innovativen
SafeDrop®-System, einem von OmniVision mitentwickelten
konservierungsmittelfreien Mehrdosenbehältnis.

Es dient der verbesserten langanhaltenden Befeuchtung
der Augenoberfläche und ist zur Benetzung von harten
und weichen Kontaktlinsen während des Tragens gut ge-
eignet. Dadurch wird der Tragekomfort der Kontaktlinsen
deutlich verbessert.

Wofür wird Hylo-Vision® SafeDrop® Gel angewendet?

Hylo-Vision® SafeDrop® Gel enthält Hyaluronsäure, eine
natürliche Substanz, die auch in Strukturen des menschen-
lichen Auges und im Tränenfilm vorhanden ist.

Hylo-Vision® SafeDrop® Gel ist dadurch besonders gut ver-
träglich. Es schützt und befeuchtet die Augenoberfläche
intensiv und langanhaltend und macht sie gleitfähig,
besonders bei stärkerem und chronischem Trockenheits-
gefühl. Seine viskoelastischen Eigenschaften sorgen für
einen gleichmäßigen, stabilen und langanhaltenden Trä-
nenfilm ohne Beeinträchtigung des Sehens. So bewirkt es
eine lang anhaltende Linderung der Symptome Trocken-
heit, Reizungen und leichte Irritationen, insbesondere

- bei Umweltstress, z. B. durch Klimaanlage, Wind, Kälte,
Trockenheit oder Luftverschmutzung, beispielsweise
durch Zigarettenrauch oder


- bei Müdigkeit und Sehstress durch intensives Sehen,
z. B. an Computerbildschirmen, Mikroskopen oder langen
Autofahrten oder
- beim Tragen von harten oder weichen Kontaktlinsen
oder bei diagnostischen Eingriffen am Auge.

Ebenso kann die Einnahme bestimmter Arzneimittel (wie
z. B. Antibaby-Pille, Antiallergika, Psychopharmaka, Schlaf-
mittel) sowie medizinische Eingriffe am Auge (z. B. LASIK-
oder refraktive Operationen) eine Rolle bei der Entste-
hung von trockenen Augen spielen.

Wie wendet man Hylo-Vision® SafeDrop® Gel an?


Schritt 1:

Vor jeder Anwendung die Schutz-
kappe abnehmen.

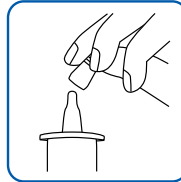


Schritt 2:

Bitte vor der ersten Anwendung
der SafeDrop®-Flasche mehrere
Druckbewegungen ausführen, bis
der erste Tropfen produziert wird.
Halten Sie dabei gemäß Abbildung
die Flasche kopfüber. Bitte ver-
meiden Sie jeglichen Kontakt der
Tropferspitze mit den Fingern und dem Auge.

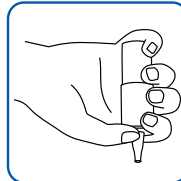


Schritt 3:

Halten Sie die Flasche, wie im Bild
dargestellt. Achten Sie darauf,
dass der Daumen auf der breiten,
abrutschsicheren, runden Finger-
auflage ruht.

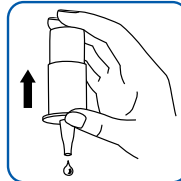

Schritt 4:

Bringen Sie den Kopf in eine
Nackenposition, ziehen Sie das
untere Augenlid mit der freien
Hand herunter. Träufeln Sie bei
Bedarf einen bis zwei Tropfen
Hylo-Vision® SafeDrop® Gel in den
geöffneten Bindehautsack ein, in-
dem Sie ein bis zweimal den Pumpmechanismus betäti-
gen. Achten Sie darauf, dass dabei die Flasche senkrecht

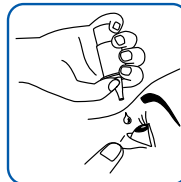

gehalten wird. Schließen Sie langsam die Augen, so dass sich die Tropfen gleichmäßig auf der Augenoberfläche verteilen können.

Alternativ, wenn die Tropfen in Verbindung mit Kontaktlinsen angewendet werden, bringen Sie einen oder zwei Tropfen auf jede Kontaktlinse auf, bevor Sie sie in Ihre Augen setzen, anstatt die Tropfen direkt in Ihre Augen zu geben.

Wie oft sollte man Hylo-Vision® SafeDrop® Gel anwenden?

Hylo-Vision® SafeDrop® Gel kann mehrmals pro Tag angewendet werden.

Wenn Ihre Beschwerden während der Anwendung von Hylo-Vision® SafeDrop® Gel anhalten, suchen Sie bitte Ihren Augenarzt auf.

Wann sollte Hylo-Vision® SafeDrop® Gel nicht angewendet werden?

Hylo-Vision® SafeDrop® Gel sollte nicht bei einem Verdacht auf eine Augeninfektion oder bei einer bestehenden Augeninfektion sowie bei einer bestehenden Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe angewendet werden.

Welche Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise sind zu beachten?

- Nicht verwenden bei beschädigtem SafeDrop® Mehrdosenbehälter.
- Das Auge mit der Tropferspitze nicht berühren, um Infektionen oder Verletzungen des Auges zu vermeiden.
- Im Falle einer zusätzlichen lokalen Behandlung der Augen sollte zwischen den beiden Anwendungen ein zeitlicher Abstand von ca. 30 Minuten bestehen. Augensalben sollten stets als letztes angewendet werden.
- Nach der Anwendung kann vorübergehend die Sehschärfe verringert sein; in diesem Fall kein Fahrzeug lenken, keine Maschinen bedienen und warten, bis die normale Sehschärfe wieder eingetreten ist.
- Verwenden Sie die Augentropfen nicht nach Ablauf des Verfallsdatums. Dieses wird auf jeder SafeDrop®-Flasche sowie auf dem Umkarton angegeben.



Was enthält Hylo-Vision® SafeDrop® Gel?

Hylo-Vision® SafeDrop® Gel enthält Natriumhyaluronat (0,30 %), Natriumcitrat, Natriumchlorid, Citronensäure, gereinigtes Wasser

Frei von Konservierungsmitteln. Durch den Verzicht auf Phosphatpuffer besonders gut verträglich.

Wie ist Hylo-Vision® SafeDrop® Gel zu lagern?

Bei Raumtemperatur lagern. Vor Frost schützen.

Angaben zur Lotnummer und zum Verfallsdatum sind auf der Flasche sowie auf dem Umkarton angegeben.

Nach Anbruch sechs Monate verwendbar.

Folgende Packungsgrößen sind erhältlich:

10 ml Augentropfen und 2 x 10 ml Augentropfen

Stand der Gebrauchsanweisung: Juni 2015

CE 0344

 **OmniVision GmbH**
Lindberghstraße 9

82178 Puchheim
Deutschland
Telefon +49 (0)89 / 84 07 92-30
Telefax +49 (0)89 / 84 07 92-40
www.omnivision.de
info@omnivision.de

Vertrieb Österreich

OmniVision GmbH
Anton Anderer Platz 6
1210 Wien
Österreich

LOT
STERILE A



25°C


STERILE A


Mindesthaltbarkeitsdatum (JJJJ-MM)
Sterilisationsverfahren, aseptisch
Bitte Gebrauchsinformation beachten.

NOT28402V01